

UWAGA:

Bufor znajdujący się w próbówce zawiera toksyczną substancję - azydek sodu ($\text{NaN}_3 < 0,1\%$). Nie dopuszczać do kontaktu ze skórą, oczami i ustami. W przypadku zetknięcia dobrze wypłukać wodą i skontaktować się z lekarzem.


Nie należy pobierać próbek w trakcie menstruacji. Przed pobraniem próbki kału, w razie potrzeby, opróżnij pęcherz moczowy.



Naciągnij podkładkę toaletową/folię na deskę toaletową i oddaj kał.




Delikatnie otwórz otrzymaną probówkę, obracając w lewo i pociągając do góry zieloną zatyczkę. Na końcówce patyczka znajdują się rowki. Pobierz materiał poprzez skrobanie patyczkiem powierzchni kału, wypełniając jego rowki.

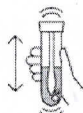

Zakręć probówkę i wytrząsaj góra-dół przez ok. 1 minutę.



Opisz probówkę imieniem, nazwiskiem i datą pobrania kału. Po drugiej stronie próbki naklej wzdłuż indywidualny kod kreskowy (dołączony do zestawu).

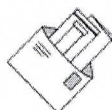

Umieść probówkę w dołączonym do zestawu woreczku strunowym i zamknij go. Woreczek strunowy z probówką dostarcz jak najszybciej do Punktu Pobrań Hormon-DIA, w którym zakupiłeś badanie. Materiał przechowuj, a optymalnie również transportuj, w **temperaturze lodówkowej**.

UWAGA:

Nieprawidłowe pobranie materiału może skutkować niemożliwością uzyskania wyniku.